


1085211FR Rév. 02 03/2015


## CONTENU

4x tubes de prélèvement sanguin QFT-Plus  
(Nil, TB1, TB2, Mitogen)  
1x aiguille 21G  
1½ pouce (0,8 x 38 mm)  
1x porte-tubes de sécurité QUICKSHIELD  
1x notice de test

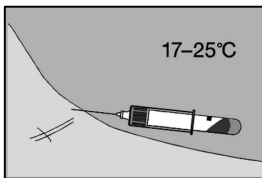

## ⚠ AVERTISSEMENT :

- Les précautions standard de manipulation de sang s'appliquent.
- Les tubes peuvent être stockés et doivent être utilisés à température ambiante (de 17 °C à 25 °C).

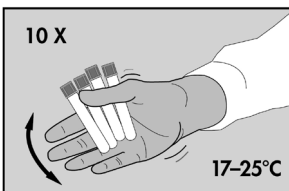

# QuantiFERON®-TB Gold Plus (QFT®-Plus)

①

## Tubes de prélèvement sanguin

Pack pour patient unique

(N° de réf. 622222) À utiliser entre le niveau de la mer et 810 m d'altitude

⚠ Une utilisation en dehors de l'intervalle d'altitudes spécifié peut entraîner une modification du volume de sang aspiré.  
À utiliser avec lit kit QFT-Plus ELISA  
(N° de réf 622120).

## PRÉLÈVEMENT DE SANG

②

Prélever le sang par ponction veineuse.

*Le vide se remplit à 1 ml (jusqu'au marquage noir ; une marge comprise entre 0,8 et 1,2 ml est acceptable).  
Le flux de sang peut être lent.*

*Maintenir le tube au niveau de l'aiguille pendant 2 à 3 secondes après que le flux de sang a cessé.  
Répéter la procédure si le niveau n'est pas proche du marquage.*

### Conseil technique

Aiguilles à ailettes : purger la tubulure avec un tube normal (non fourni) avant de remplir les tubes QFT-Plus.

## PRÉLÈVEMENT DE SANG


③

Immédiatement après avoir rempli les tubes, les secouer dix (10) fois suffisamment fort pour s'assurer que toute la paroi interne du tube est tapissée de sang, et ce, afin de dissoudre les antigènes présents sur les parois du tube.

⚠ *Le tube doit être à une température de 17 °C à 25 °C au moment du remplissage.  
Le secouement trop énergique des tubes peut provoquer une perturbation du gel et peut entraîner des résultats aberrants.*

Étiqueter correctement les tubes.



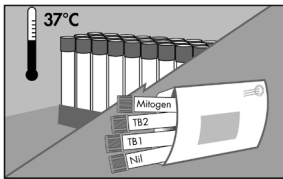

**1ère OPTION**  
Incuber au laboratoire

**EXPÉDITION/INCUBATION**


④

Expédier les tubes au laboratoire à une température comprise entre 17 et 27 °C. Le sang doit être incubé à 37 °C dès que possible (et dans les 16 heures suivant le prélèvement).

*Le personnel de laboratoire doit remélanger les tubes en les retournant 10 fois, immédiatement avant leur incubation à 37 °C.*

**Conseil technique**

Étiqueter les tubes comme « non incubés ».

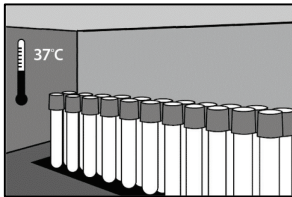

**2ème OPTION**  
Incuber sur le site  
de prélèvement

**EXPÉDITION/INCUBATION**

⑤


Le sang doit être incubé dès que possible (et dans les 16 heures suivant le prélèvement) en plaçant les tubes debout. Incuber les tubes **debout** à 37 °C pendant 16 à 24 heures.

*Les incubateurs peuvent être obtenus auprès de QIAGEN.*

**Conseil technique**

*Humidité/CO<sub>2</sub> non requis.*

Si les tubes ne sont pas incubés à 37 °C peu après le prélèvement, **un nouveau mélange des tubes doit être effectué juste avant l'incubation en les retournant 10 fois.**

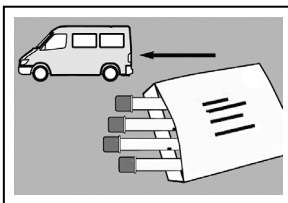

**2ème OPTION (suite)**

**EXPÉDITION/INCUBATION**


⑥

Expédier les tubes **incubés** au laboratoire d'analyse (dans les 3 jours).

*Maintenir les tubes à une température comprise entre 4 et 27 °C.*

**Conseil technique**

Étiqueter les tubes comme « incubés ».

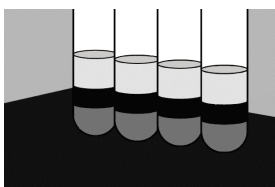

**CENTRIFUGATION**

⑦

Centrifuger les tubes avant de les échantillonner.

*Centrifuger à 2 000-3 000 g pendant 15 minutes.*

Le plasma dans les tubes centrifugés reste stable 28 jours si les tubes sont conservés entre 2 et 8 °C



[www.QuantiFERON.com](http://www.QuantiFERON.com)



Antigens licensed from Statens Serum Institut  
ssi.dk | serum@ssi.dk

Pour consulter les dernières informations sur les contrats de licence et les avis de non-responsabilité spécifiques aux produits, voir la notice QuantiFERON-TB Gold Plus ELISA.

**COORDONNÉES :**

⑧

QIAGEN

Asia-Pacific: techservice-ap@qiagen.com

Europe: techserviceQFT-eu@qiagen.com

Middle East/Africa: techserviceQFT-eu@qiagen.com

Latin America (not including Brazil or Mexico):

techservice-latam@qiagen.com

Mexico: techservice-MX@qiagen.com

Brazil: techsebr@qiagen.com

Marques déposées : QIAGEN®, QFT®, QuantiFERON® (groupe QIAGEN).

© 2015 QIAGEN, tous droits réservés.



QIAGEN GmbH  
QIAGEN Strasse 1  
40724 Hilden  
Allemagne  
+49-2103-29-0



---

[www.QuantiFERON.com](http://www.QuantiFERON.com)