

Prélèvement sur écouvillon E-Swab et Multi-Collect

Matériel :

Ecouvillons « E-Swab »
traditionnels (ROSE)



Pour prélèvements de gorge,
Vagin, plaie,...

Ecouvillons « E-Swab »
fins (ORANGES)



Pour prélèvement de nez,
urètre,..

Ecouvillons «MultiCollect»



Pour prélèvements PCR
Gono-Chlamydia

Prélèvement :

Réaliser le prélèvement avec l'extrémité ouatée de l'écouvillon.

Ouvrir le tube de milieu de transport et y introduire l'extrémité ouatée de l'écouvillon, casser la tige de l'écouvillon au niveau du repère et laisser l'écouvillon dans le tube.

Bien revisser le bouchon sur le tube de transport, et identifier avec les nom et prénom du patient.



Stockage provisoire et transport :

Conserver provisoirement (quelques heures) et transporter à t° ambiante (18°- 26°).


PRELEVEMENT AU MOYEN D'UN ECOUVILLON E-SWAB



1. Ouvrir l'emballage



2. Prendre l'écouvillon et le tube

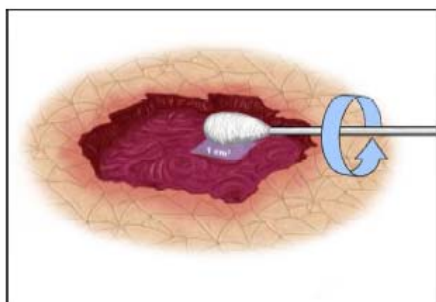

3. Prendre l'échantillon



4. Dévisser le bouchon



5. Mettre l'écouvillon dans le tube



6. Casser la tige au repère



7. Jeter la partie cassée



8. Refermer le tube et l'envoyer au labo

INSTRUCTIONS POUR LE FROTTIS DE GORGE



1. Ouvrir l'emballage



2. Prendre l'écouvillon et le tube



3. Prendre l'échantillon



4. Dévisser le bouchon



5. Mettre l'écouvillon dans le tube



6. Casser la tige au repère



7. Jeter la partie cassée



8. Refermer le tube et l'envoyer au labo

INSTRUCTIONS POUR LE FROTTIS NASOPHARYNGIEN



1) Etape 1 : Introduire l'écouvillon (flocked swab) dans une narine du patient jusqu'à rencontrer une légère résistance .



2) Etape 2 : Tourner l'écouvillon 2 à 3 fois et tenir l'écouvillon en place pendant 5 secondes pour avoir un maximum d'absorption



3) Etape 3 : Mettre l'écouvillon dans le tube de transport avec le milieu liquide . Casser la tige à l'endroit prévu. Refermer le tube et l'envoyer au laboratoire.