


## Prélèvement des tubes STRECK pour test NIPT

- **PRELEVEMENT** : Tubes : Cell-Free DNA BCT® CE de marque **Streck**



Volume nécessaire : **10mL**

**ATTENTION** : directement après la ponction veineuse, mélanger délicatement le tube en le **retournant 10 fois** !

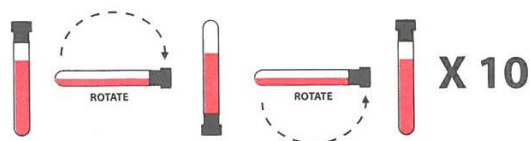

- **STOCKAGE PROVISoire** : **stocker** les tubes **au frigo** (4°C) directement après le prélèvement !
- **TRANSPORT** : Le **transport** peut s'effectuer à température ambiante (max. 37°C)